

# Porte-sonde NasoGastric Dale®

## Fixation aisée et supérieure pour les sondes naso-gastriques

Le porte-sonde NasoGastric Dale® est idéal pour fixer les sondes de nutrition et d'aspiration telles que les sondes de drainage Salem, les sondes gastriques Levin, les sondes d'alimentation naso-entérales ainsi que les sondes intestinales naso-gastriques. L'adhésif est inoffensif pour la peau et peut rester en place pour une longue durée tout en restant facile à enlever.

## Mode d'emploi pour l'application

1. Après la mise en place, nettoyer la sonde et le nez avec des lingettes imbibées d'alcool.
2. Séparer complètement le porte-sonde de sa base porteur, en commençant par le tampon nasal. Appliquer le tampon nasal sur le nez (Figure 1).
3. Choisir la languette la plus proche de la sonde et commencer à l'enrouler en spirale autour de la sonde, tout en serrant bien (Figure 2).
4. Fixer définitivement la sonde en enroulant de la même manière la seconde languette (Figure 2).

Pour enlever: se servir simplement des extrémités non adhésives pour dérouler les languettes de la sonde.

**À usage unique.**

## Renseignement pour les commandes

#H8410**1601** Porte-sonde NasoGastric Dale®

Taille unique. Conditionnement en paquets individuels.  
Vendu en boîtes de 50 unités.

**SANS LATEX**

