

# Naso-Gastraler Sondenhalter

## Hervorragend sicherer Halt für nasale Magensonden

Der Dale Naso-Gastrale Sondenhalter wird zum Fixieren von Ernährungs- und Aspirationsschläuchen verwendet, z.B. Salem-Gastroduodenalsonden, Levin-Magensonden, naso-enterale Ernährungs- und naso-gastrale Darmschläuche. Die hautfreundliche Klebefläche gewährleistet sicheren Haltauch über einen längeren Zeitraum und ist trotzdem leicht zu entfernen.

## Gebrauchsanweisung

1. Nach Intubation den Schlauch sowie die Nase des Patienten mit einem alkoholgetränkten Tuch reinigen.
2. Den Halter – am Nasenpolster beginnend – vollständig von der Schutzfolie abziehen. Das Nasenpolster auf der Nase anbringen (Abbildung 1).
3. Die dem Schlauch am nächsten liegende Lasche spiralförmig fest um den Schlauch wickeln. (Abbildung 2).
4. Die andere Lasche auf gleiche Weise spiralförmig um den Schlauch wickeln (Abbildung 2).

Zum Entfernen: Einfach die nicht haftenden Spitzen greifen und die Laschen vom Schlauch abwickeln.

**Nur zur Verwendung an einem Patienten.**

## Bestellinformationen

#H8410**1601** Dale® Naso-Gastraler Sondenhalter

Passt universal. Einzeln verpackt. Erhältlich in Kartons à 50 Stück.

**LATEX-FREI**

