

Dale® 経鼻胃管ホルダー

経鼻胃管のための優れた安全性

Dale 社の経鼻胃管ホルダーは、Salem のサンプチューブ、Levin の胃チューブ、経鼻腸栄養チューブおよび経鼻胃腸チューブのような、栄養チューブおよび呼吸チューブを固定するには理想的なものです。肌にやさしい接着剤が長時間ずれない一方、取り外すのも簡単です。

[ラテックスフリー]

装着方法

1. 患者への挿管を済ませて、チューブと鼻をアルコール綿で消毒します。ベンゾインは使用しないでください。
2. 鼻パッドから始めて、ホルダーを完全にライナーからはがしてください。鼻に鼻パッドをつけてください。(図1)
3. チューブに一番近いタブを選んで、チューブにしっかりとらせん状に巻きつけてください。(図2)
4. 残りのタブを同じらせん状に巻きつけてください。(図2)

取り外し方法：非粘着性の棒状の先端でチューブからタブをはがしてください。

同一患者の使用に限る

注文情報

#H8410 1601

Dale 経鼻胃管ホルダー

どんなサイズにも合います。個別パッケージ。
箱（50 個入り）単位で販売。

Dale Medical Products, Inc.
7 Cross Street, P.O. Box 1556
Plainville, MA 02762-0556, USA
電話：800-343-3980 海外から：508-695-9316
ファックス：508-695-6587 www.dalemed.com

欧州代理店
Medlink Europe B.V. Nieuwegein, NL
電話：31-30-287-0458 ファックス：31-30-280-0388