

## Dale® NasoGastric 튜브 홀더

### Naso-Gastric 튜브의 뛰어난 안정성

Dale NasoGastric 튜브 홀더는 Salem 집수 튜브, Levin 위장 튜브, Naso-enteric 급식 튜브, naso-gastric 장 튜브 등 각종 급식 및 호흡 튜브를 고정시키는 기능이 뛰어납니다. 피부에 해롭지 않은 접착제를 사용하여 장기간 사용할 수 있으며 간단하게 떼어낼 수 있습니다.

#### [라텍스 사용 안 함]

### 사용 방법

1. 환자에게 튜브를 삽입한 후 튜브와 코 부분을 알코올로 닦아 주되 벤조인의 사용은 금한다.
2. 코 보호패드에서부터 튜브를 라이너에서 완전히 떼어낸 다음 보호패드를 코에 붙인다. (그림 1)
3. 코에 가장 가까운 탭을 선택하여 튜브를 나선형으로 단단하게 감는다. (그림 2)
4. 나머지 탭도 마찬가지로 나선형으로 감는다. (그림 2)

떼어내려면 접착성이 없는 탭을 사용하여 튜브에서 탭을 제거합니다.

다른 환자와의 공동 사용을 금함.

### 주문 정보

#H84101601

### Dale® NasoGastric 튜브 홀더

사용에 제한 없음. 날개 포장, 50개들이 박스 판매

#### DALE MEDICAL PRODUCTS, INC.

7 Cross Street, P.O. Box 1556

Plainville, MA 02762-0556 USA

전화: 800-343-3980

국제전화: 508-695-9316

팩스: 508-695-6587

www.dalemed.com

#### EU 대표:

CE Medlink Europe B.V. Nieuwegein, NL.

전화: 31.30.287.0458

팩스: 31.30.280.0388

개정 A