

Numéro

produit **270**

S'adapte aux sondes endotrachéales de 7,0 mm à 10,0 mm

Support de sonde endotrachéale Dale® Stabilock™

Pour une stabilisation confortable et sûre

Description du produit

Aide à prévenir les extubations accidentelles.

Instructions pour l'application

1. Nettoyez la sonde. Laissez-la sécher.

2. Nettoyez la peau. Appliquez la solution de préparation de la peau. Retirez les pellicules de protection de la base adhésive et placez le dispositif directement au-dessus de la lèvre supérieure du patient.

(A) Coupez les bords si nécessaire. La base adhésive peut s'appliquer avec les languettes arrondies vers le haut ou vers le bas.

Pour les patients traumatisés ou dont le visage comporte des pilosités, modifiez la base adhésive selon les besoins de la personne : appliquez le dispositif sur la mâchoire inférieure, les languettes arrondies orientées vers le haut ou coupez celles-ci et appliquez le dispositif sur les joues du patient.

Changez la base adhésive au bout de trois jours ou plus tôt si nécessaire.

3. Pressez le collier sur la portion en Velcro® de la base, en veillant à ce que le porte-sonde soit aligné avec la sonde endotrachéale. (B)

4. Ouvrez les languettes d'attache qui se trouvent aux extrémités du collier et faites passer le collier autour de la tête juste en dessous des oreilles. Attachez les languettes d'attache sur l'extérieur du collier. (C)

5. Appuyez sur le porte-sonde pour l'enfoncer sur la sonde endotrachéale. (D)

6. Juste après le repère de la sonde endotrachéale, enroulez solidement un ruban adhésif fort (un ruban en tissu, par exemple) en spirale autour du porte-sonde et de la sonde pour bien les attacher. **Assurez-vous de couvrir la sonde endotrachéale de ruban adhésif, en dépassant le porte-sonde d'au moins 2,5 cm (1 po.).** (E)
Changez le ruban adhésif si nécessaire.

Assurez la sécurité du collier en réajustant les languettes d'attache si nécessaire.

Repositionnement de la sonde : Ouvrez les languettes d'attache. Maintenez la base adhésive en place tout en retirant le collier de la base. Repositionnez la sonde endotrachéale. Pressez-la contre la base et attachez les languettes d'attache.

Pour retirer le dispositif : Retirez le ruban adhésif pour enlever la sonde endotrachéale du porte-sonde, retirez le collier et enlevez délicatement la base adhésive.

Dale **recommande** de repositionner souvent la sonde endotrachéale pour éviter des lésions aux lèvres et aux tissus sous-jacents occasionnées par une pression continue.

Dale **recommande fortement** de supporter la tubulure du ventilateur pour réduire la pression sur la sonde endotrachéale.

Liste de vérification pour réussir l'application

- ✓ **Préparez** la peau à chaque fois que vous appliquez la base adhésive
- ✓ **Positionnez** la base adhésive directement au-dessus de la lèvre
- ✓ **Enroulez solidement** un ruban adhésif fort autour du porte-sonde et de la sonde
- ✓ **Assurez-vous** de couvrir la sonde de ruban adhésif, en dépassant le porte-sonde d'au moins 2,54 cm (1 po.)
- ✓ **Retirez** délicatement la base adhésive pour minimiser les lésions cutanées
- ✓ **Supportez** la tubulure du ventilateur

Pour voir une démonstration du dispositif en cours d'utilisation, une vidéo d'application et obtenir plus d'informations, consultez le site www.dalemed.com.

Pour commander

#H84102701 **Support de sonde endotrachéale Dale® Stabilock™**

S'adapte aux sondes endotrachéales de 7,0 mm à 10,0 mm

Emballage individuel, vendu en boîtes de 10.

#H84102731 **Base adhésive Dale® Stabilock™**

Emballage individuel, vendu en boîtes de 10.

Jetable. À usage unique. Brevet en instance.
Conforme aux directives ACLS.

Les produits Dale Medical sont disponibles auprès de votre hôpital/fournisseur de produits médicaux préféré.

Sans latex.

©2006 Dale Medical Products, Inc. Velcro est une marque déposée de Velcro USA, Inc.
Tous droits réservés.
Imprimé aux U.S.A.

RÉV B