

Produkt-  
Nummer **270**  
Für Endotrachealtuben von 7,0 – 10,0 mm

## Dale® Stabilock™ Endotrachealtubushalter

*Für bequeme und sichere Stabilisierung*

### Produktbeschreibung

Der Endotrachealtubushalter verhindert die versehentliche Extubation.

### Befestigungsanweisung

1. Den Tubus säubern und trocknen lassen.
2. Die Haut reinigen und mit dem beiliegenden Präparat vorbereiten. Die Abdeckfolie vom Klebestreifen abziehen. Den Klebestreifen direkt über der Oberlippe des Patienten anbringen.  
(A) Falls notwendig zurechtschneiden. Der Klebestreifen kann mit den runden Laschen nach oben oder unten angebracht werden.

Bei Patienten mit Gesichtsverletzungen oder Behaarung den Klebestreifen den individuellen Gegebenheiten anpassen: mit den runden Laschen nach oben auf dem Unterkiefer anbringen oder die runden Laschen abschneiden und den Klebestreifen auf den Wangen des Patienten anbringen.

Den Klebestreifen nach 3 Tagen oder falls erforderlich früher auswechseln.

3. Das Nackenband auf den Velcro® Klettbandstreifen des Klebestreifens drücken und sicherstellen, dass der Tubuskanal mit dem Endotrachealtubus ausgerichtet ist. (B)
4. Die an beiden Enden des Nackenbandes befindlichen Befestigungslaschen öffnen und das Nackenband unmittelbar unterhalb der Ohren um den Kopf legen. Die Befestigungslaschen an der Außenseite des Nackenbandes sichern. (C)
5. Den Kanal nach unten auf den Endotrachealtubus drücken. (D)
6. Ein starkes Klebeband (z. B. aus Stoff) zur Sicherung über die Positionsmarkierung des Endotrachealtubus hinaus spiralförmig um den Kanal und den Tubus wickeln. **Sicherstellen, dass das Klebeband mindestens 2,5 cm über den Kanal hinaus um den Endotrachealtubus gewickelt ist.** (E)  
Das Band nach Bedarf auswechseln.

Sicherstellen, dass das Nackenband sicher sitzt. Ggf. die Befestigungslaschen anpassen.

**Repositionierung des Tubus:** Die Befestigungslaschen öffnen. Den Klebestreifen festhalten, während das Nackenband vom Klettbandstreifen abgezogen wird. Den Endotrachealtubus neu positionieren. Das Nackenband wieder auf den Klebestreifen drücken und die Befestigungslaschen schließen.

**Entfernen:** Den Tubus vom Kanal entfernen, das Nackenband entfernen und den Klebestreifen vorsichtig abziehen.

Dale **empfiehlt eine häufige Repositionierung des Endotrachealtubus**, um eine Verletzung der Lippen und des darunter liegenden Gewebes durch andauernden Druck zu vermeiden.

Dale **empfiehlt ausdrücklich, den Beatmungstubus abzustützen**, um den Druck auf den Endotrachealtubus zu reduzieren.

**Checkliste für  
die sichere Befestigung**

- ✓ **Die Haut** jedes Mal präparieren, wenn der Klebestreifen angebracht wird.
- ✓ **Den** Klebestreifen über der Oberlippe anbringen.
- ✓ **Ein starkes Klebeband** spiralförmig fest um den Kanal und Tubus wickeln.
- ✓ **Sicherstellen**, dass das Klebeband mindestens 2,5 cm über den Kanal hinaus um den Tubus gewickelt ist.
- ✓ **Den Klebestreifen** vorsichtig abziehen, um die Haut nach Möglichkeit nicht zu verletzen.
- ✓ **Den Beatmungstubus** abstützen.

Eine Vorführung der Verwendung, ein Video zur Befestigung und weitere Informationen finden Sie unter [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com).

Bestellinformationen
H84102701 <b>Dale® Stabilock™ Endotrachealtubushalter</b> Für Endotrachealtuben von 7,0 – 10,0 mm Einzel verpackt in einem Karton mit 10 Stück
H84102731 <b>Dale® Stabilock™ Klebestreifen</b> Einzel verpackt in einem Karton mit 10 Stück

**Einwegprodukt.** Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Patent angemeldet.

**Erfüllt die ACLS-Richtlinien.**

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für den Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

**Latexfrei.**

©2006 Dale Medical Products, Inc. Velcro is eine eingetragene Marke der Velcro USA Inc..

Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in den USA.

**REV. B**