

Αριθμός

Προϊόντος **270**

Δέχεται ενδοτραχειακό σωλήνα μεγέθους 7 έως 10mm

Dale® Stabilock™

Υποδοχή ενδοτραχειακού σωλήνα

Για άνετη και ασφαλή σταθεροποίηση

Περιγραφή προϊόντος

Βοηθά στην αποτροπή απροσδόκητης αφαίρεσης του σωλήνα.

Οδηγίες Εφαρμογής

1. Καθαρίστε το σωλήνα. Αφήστε τον να στεγνώσει.

2. Καθαρίστε το δέρμα. Προετοιμάστε το δέρμα. Αφαιρέστε τις επενδύσεις από την αυτοκόλλητη βάση και τοποθετήστε την απευθείας πάνω από το άνω χέιλος του ασθενούς.

(Α) Ψαλιδίστε αν χρειάζεται. Η αυτοκόλλητη βάση μπορεί να εφαρμοστεί με τα στρογγυλεμένα πτερύγια προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για ασθενείς που φέρουν τραύμα ή τρίχωση στο πρόσωπο, προσαρμόστε την αυτοκόλλητη βάση ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του ασθενούς: εφαρμόστε τη βάση στην κάτω γνάθο με τα στρογγυλεμένα πτερύγια προς τα επάνω ή κόψτε τα στρογγυλεμένα πτερύγια και εφαρμόστε τη βάση στα μάγουλα του ασθενούς.

Αλλάξτε την αυτοκόλλητη βάση μετά από 3 ημέρες ή νωρίτερα αν χρειάζεται.

3. Πιέστε το περιλαίμιο πάνω στο τμήμα της βάσης με το Velcro® φροντίζοντας να ευθυγραμμίσετε το Κανάλι του σωλήνα με τον ενδοτραχειακό σωλήνα. **(Β)**

4. Ανοίξτε τα συνδετικά πτερύγια που βρίσκονται στις δύο άκρες του περιλαίμιου και τυλίξτε την ταινία γύρω από το κεφάλι ακριβώς κάτω από τα αυτιά. Ασφαλίστε τα συνδετικά πτερύγια στο εξωτερικό του περιλαίμιου. **(Γ)**

5. Πιέστε το Κανάλι προς τα κάτω πάνω στον ενδοτραχειακό σωλήνα. **(Δ)**

6. Ακριβώς πέρα από το σημάδι τοποθέτησης του ενδοτραχειακού σωλήνα τυλίξτε σφικτά μια δυνατή συγκολλητική ταινία (ένα ύφασμα) με μια σπειροειδή κίνηση γύρω από το Κανάλι και το σωλήνα που θέλετε να διασφαλίσετε. **Φροντίστε να τυλίξετε την ταινία πάνω από τον ενδοτραχειακό σωλήνα τουλάχιστον 1 ίντσα (2,5 εκ.) πέρα από το Κανάλι. (Ε)**
Αλλάξτε ταινία αν χρειαστεί.

Διαπιστώστε την ασφάλιση του περιλαίμιου ρυθμίζοντας τα συνδετικά πτερύγια όπως χρειάζεται.

Επανατοποθέτηση του σωλήνα: Ανοίξτε τα συνδετικά πτερύγια. Κρατήστε προς τα κάτω την αυτοκόλλητη βάση ενώ αποσπάτε το περιλαίμιο από την υποδοχή. Επανατοποθετήστε τον ενδοτραχειακό σωλήνα. Πιέστε πάλι πάνω στη βάση και ασφαλίστε τα συνδετικά πτερύγια.

Αφαίρεση: Αφαιρέστε την ταινία από το Κανάλι, αφαιρέστε το περιλαίμιο και αποσπάστε απαλά την αυτοκόλλητη βάση.

Η Dale **συνιστά όπως επανατοποθετείτε συχνά τον ενδοτραχειακό σωλήνα** για να αποφύγετε τον τραυματισμό των χειλιών και του υποκείμενου ιστού λόγω της αδιάκοπης πίεσης.

Η Dale **συνιστά έντονα όπως υποστηρίζετε το σωλήνα εξαιρισμού** για να μειώσετε την πίεση στον ενδοτραχειακό σωλήνα.

Εύχρηστος κατάλογος ελέγχου

για την επιτυχή εφαρμογή

- ✓ **Προετοιμάζετε** το δέρμα κάθε φορά που εφαρμόζετε την αυτοκόλλητη βάση
- ✓ **Τοποθετήστε** την αυτοκόλλητη βάση ακριβώς πάνω από τη γραμμή του χείλους
- ✓ **Τυλίξτε σφικτά με σπειροειδή κίνηση** ισχυρή συγκολλητική ταινία γύρω από το Κανάλι και τον σωλήνα
- ✓ **Φροντίστε** να τυλίξετε την ταινία πάνω στο σωλήνα τουλάχιστον 1 ίντσα (2,5 εκ.) πέρα από το Κανάλι
- ✓ **Αφαιρέστε** απαλά την αυτοκόλλητη βάση για να μειώσετε την κάκωση του δέρματος.
- ✓ **Υποστηρίξτε** το σωλήνα εξαερισμού

Για να δείτε ένα βίντεο επίδειξης του τρόπου λειτουργίας και εφαρμογής και για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dalemed.com.

Πληροφορίες παραγγελίας	
Υποδοχή ενδοτραχειακού σωλήνα Dale® Stabilock™ Αρ. H84102701 10mm τεμαχίων.	Δέχεται ενδοτραχειακό σωλήνα μεγέθους 7 έως Ατομικά συσκευασμένες σε κουτί των 10
Αυτοκόλλητη βάση Dale® Stabilock™ Αρ. H84102731 τεμαχίων.	Ατομικά συσκευασμένες σε κουτί των 10

Αναλώσιμες. Για χρήση σε ένα μόνο ασθενή. Εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας **Συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες ACLS.**

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους έγκριτους αντιπροσώπους τροφοδοσίας νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων.

Δεν περιέχει λατέξ.

©2006 Η ονομασία Dale Medical Products, Inc. Velcro είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρίας Velcro USA, Inc.

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

ΑΝΑΘ. Β