

Codice prodotto **270**  
Per tubi endotracheali da 7,0 a 10,0 mm

## Supporto per tubo endotracheale Dale® Stabilock™

---

*Per una stabilizzazione sicura e confortevole*

### Descrizione del prodotto

Contribuisce a prevenire l'estubazione fortuita.

### Istruzioni per l'applicazione

1. Pulire il tubo e lasciarlo asciugare.

2. Pulire la cute. Applicare un preparato per la pelle. Rimuovere il rivestimento dalla base adesiva ed applicarla direttamente sopra il labbro superiore del paziente. (A) Rifilare se necessario. È possibile applicare la base adesiva con le alette arrotondate orientate sia in alto che in basso.

Nel caso di pazienti affetti da trauma o con barba o baffi, modificare la base adesiva a seconda della situazione. Applicarla sulla mascella inferiore con le alette arrotondate orientate verso l'alto o tagliare le alette ed applicare la base sulle guance.

Cambiare la base adesiva dopo 3 giorni o prima se necessario.

3. Premere il collare sulla sezione in Velcro® della base, verificando che il canale del tubo sia ben allineato al tubo endotracheale. (B)

4. Aprire entrambe le linguette di aggancio poste alle estremità del collare ed avvolgere la fascia attorno al capo del paziente appena sotto le orecchie. Fissare le linguette di aggancio all'esterno del collare. (C)

5. Premere verso il basso il canale sul tubo endotracheale. (D)

6. Immediatamente oltre il contrassegno del tubo endotracheale, avvolgere strettamente a spirale uno spezzone di cerotto robusto (ad esempio, in tela) attorno al canale ed al tubo, fissando il tutto. **Accertarsi di avvolgere il cerotto sul tubo endotracheale un minimo di 2,5 cm al di là del canale.** (E)

Cambiare il cerotto se necessario.

Verificare che il collare sia ben saldo, regolando opportunamente le linguette di aggancio.

**Riposizionamento del tubo.** Aprire le linguette di aggancio. Premere e mantenere ferma la base adesiva mentre si strappa il collare. Riposizionare il tubo endotracheale. Riagganciare il collare sulla base e fissare le linguette di aggancio.

**Rimozione.** Rimuovere il cerotto dal canale ed il collare, strappando delicatamente la base adesiva.

La Dale **consiglia di riposizionare spesso il tubo endotracheale** per evitare di ledere le labbra ed il tessuto sottostante a seguito della continua pressione.

La Dale **consiglia vivamente di sorreggere il tubo del ventilatore** per ridurre la pressione sul tubo endotracheale.

## Pratico elenco di spunta per un'applicazione ben riuscita

- ✓ **Preparare** la pelle ogni volta che si applica la base adesiva.
- ✓ **Posizionare** la base adesiva direttamente sopra il bordo del labbro.
- ✓ **Avvolgere a spirale stretta** un cerotto robusto attorno al canale ed al tubo.
- ✓ **Accertarsi di** avvolgere il cerotto sul tubo almeno 2,5 centimetri al di là del canale.
- ✓ **Rimuovere** delicatamente la base adesiva per ridurre al minimo i danni cutanei.
- ✓ **Sorreggere** il tubo del ventilatore.

*Per una dimostrazione in loco, il video applicativo ed ulteriori informazioni, visitare il sito [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com).*

### Informazioni sugli ordinativi

#H84102701	<b>Supporto per tubo endotracheale Dale® Stabilock™</b> Per tubi endotracheali da 7 a 10 mm. Scatola da 10 pezzi in confezione singola.
#H84102731	<b>Base adesiva Dale® Stabilock™</b> Scatola da 10 pezzi in confezione singola.

**Monouso.** Da usarsi su un solo paziente. In attesa di brevetto.  
**È conforme alle direttive ACLS.**

I prodotti sanitari Dale sono reperibili presso il distributore abituale di forniture ospedaliere/sanitarie.

**Il prodotto non contiene lattice.**

©2006 Dale Medical Products, Inc. Velcro è un marchio depositato della Velcro USA, Inc.

**Tutti i diritti riservati.**

Stampato negli Stati Uniti d'America.

**REV. B**