

商品

番号 **270**

サイズ7.0-10.0mmに適合する気管内チューブ

Dale® Stabilock™

気管内チューブホルダー

快適・確実に固定

商品説明

不慮の抜管を防ぎます。

使用方法

1. チューブを洗浄し、乾燥させます。

2. 皮膚を清潔にします。肌に準備薬を塗ります。ライナーを粘着ベースから剥がし、患者の上唇より上に直接付けます。

(A) 必要に応じてカットしてください。粘着ベースは丸いタブを上にしても下にしても付けることができます。

外傷又はひげのある患者には、個人のニーズに合わせて、粘着ベースを調整してください。丸いタブが上向きになるようあごより下に付けるか、丸いタブをカットし、患者の頬に付けます。

粘着ベースは3日又は必要に応じて3日以内に交換してください。

3. チューブのチャンネルが気管内チューブと揃っていることを確認し、ネックバンドを基部のVelcro®部分に押し当てます。(B)

4. ネックバンドの両端部にあるファスナータブを開け、バンドを耳のすぐ下まで引いて、頭に巻きます。ファスナータブをネックバンドの外側に当てて固定します。(C)

5. チャンネルを気管内チューブに押し当てます。(D)

6. 気管内チューブの位置決め印の少し上で、チャンネルとチューブを螺旋状巻きにし、強力な粘着テープ(布のようなもの)をしっかりと巻きます。チャンネルより最低2.5cmは上で、気管内チューブにテープを巻くようにしてください。(E)必要に応じてテープを交換してください。

必要に応じて、ネックバンドがきちんと固定されるようファスナータブで調整してください。

チューブの調整: ファスナータブを外します。粘着ベースを押さえながらネックバンドをベースから剥がします。気管内

チューブを調整します。ベースに折り返して押さえつけ、ファスナータブを固定します。

取り外し: チャンネルからチューブを剥がし、ネックバンドを外し、粘着ベースをそっと剥がします。

デイルは、継続的な圧力からくる唇やその下部組織への傷害を防ぐために、気管内チューブを頻繁に再調整することを**お勧めします**。

デイルは、気管内チューブへの圧力を軽減するために人工呼吸器の管をサポートすることを**強くお勧めします**。

適切に装着するための

チェックリスト

- ✓ 粘着ベースを使う時、
には必ず準備薬を塗ります。
- ✓ 上唇のすぐ上に粘着ベースを付けます。
- ✓ チャンネルとチューブの周りを強力な粘着テープで螺旋状にきつく巻きます。
- ✓ 最低チャンネルより2.5cm上にチューブがくるようテープを巻きます。
- ✓ 皮膚をできるだけ傷めないよう、粘着ベースはそっと剥がしてください。
- ✓ 人工呼吸器の管をサポートしてください。

使用説明、取扱説明ビデオ並びにその他情報は、

www.dalemed.com でご覧になれます。

注文情報

#H84102701 Dale® Stabilock™
気管内チューブホルダー サイズ7.0-10.0mm.
1箱10個入りで個別包装。

#H84102731 Dale® Stabilock™ 粘着ベース

1箱10個入りで個別包装。

使い捨て用。一人の患者のみに使用。特許出願中。

ACLSガイドラインに準拠。

Daleの医療品は優先病院 / 医療品用供給ディーラーよりお求めください。

ラテックスは含まれていません。

©2006 Dale Medical Products, Inc. VelcroはVelcro USA, Incの登録商標です。

無断複写・転載を禁じます。

Printed in U.S.A.

REV B