

Produto número **270**
Encaixa com tubos endotraqueais de 7 a 10 mm

Fixador de tubo endotraqueal Stabilock™ da Dale®

Para uma estabilização confortável e firme

Descrição do produto

Ajuda a evitar extubações acidentais.

Instruções de aplicação

1. Limpe o tubo. Deixe-o secar.
2. Limpe a pele. Aplique o preparado para a pele. Remova a cobertura da Base Adesiva e coloque-a directamente acima do lábio superior do paciente.
(A) Corte o excesso, como necessário. Pode-se aplicar a Base Adesiva com as linguetas redondas para cima ou para baixo.

Nos casos de pacientes com trauma facial ou pêlo no rosto, modifique a Base Adesiva de acordo com as necessidades individuais: aplique à mandíbula inferior com as linguetas redondas para cima ou corte-as e aplique às faces do paciente.

Troque a Base Adesiva depois de 3 dias ou menos, se necessário.

3. Prima a cinta de fixação na porção de Velcro® da base e não deixe de certificar-se de que o canal da tubulação esteja alinhado com o tubo endotraqueal. **(B)**
4. Abra as linguetas de fecho localizadas nas duas extremidades da cinta de fixação e passe a cinta em torno da cabeça, logo abaixo das orelhas. Prenda as linguetas de fecho na parte externa da cinta de fixação. **(C)**
5. Prima o Canal para baixo sobre o tubo endotraqueal. **(D)**
6. Logo depois da marcação de posição do tubo endotraqueal, passe firmemente uma fita adesiva forte (como uma fita de pano) num movimento em espiral em torno do Canal e do tubo para prender. **Passe a fita em torno do tubo endotraqueal no mínimo 2,5 cm (1 pol.) além do Canal. (E)**
Troque a fita, como necessário.

Certifique-se de que a cinta de fixação está firme ao reajustar as linguetas de fecho, como necessário.

Reposicionamento do tubo: abra as linguetas de fecho. Mantenha a Base Adesiva premida enquanto tira a cinta de fixação da base. Reposicione o tubo endotraqueal. Prima de volta na base e prenda as linguetas de fecho.

Remoção: solte o tubo do Canal, remova a cinta de fixação e, com cuidado, tire a Base Adesiva.

A Dale **recomenda que se reposicione o tubo endotraqueal com frequência** para ajudar a evitar lesões nos lábios e nos tecidos subjacentes como resultado da pressão constante.

A Dale **recomenda com veemência que a tubulação do ventilador seja apoiada** para reduzir a pressão sobre o tubo endotraqueal.

**Lista de controlo
conveniente para uma
aplicação bem-sucedida**

- ✓ **Prepare** a pele todas as vezes que a Base Adesiva seja aplicada
- ✓ **Posicione** a Base Adesiva directamente acima da linha do lábio
- ✓ **Passes firmemente e em espiral** uma fita adesiva forte em torno do Canal e do tubo
- ✓ **Passes a fita em torno** do tubo no mínimo 2,5 cm (1 pol.) além do Canal.
- ✓ **Remova** a Base Adesiva com cuidado para minimizar danos à pele
- ✓ **Apoie** a tubulação do ventilador

Para ver um vídeo de demonstração e aplicação em funcionamento e obter mais informações, visite o sítio www.dalemed.com.

Informações para pedidos	
#H84102701 Fixador de Tubo Endotraqueal Stabilock™ da Dale®	Encaixa com tubos endotraqueais de 7 a 10 mm.
	Embalado individualmente numa caixa com 10 unidades.
#H84102731 Base Adesiva Stabilock™ da Dale®	Embalada individualmente numa caixa com 10 unidades.

Descartável. Para utilização num único paciente. Patente pendente.
Cumpra as directrizes para Suporte de Vida Avançado em Cardiologia (ACLS).

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não contém látex.

©2006 Dale Medical Products, Inc. Velcro é marca registada da Velcro USA, Inc.
 Todos os direitos reservados.
 Impresso nos EUA.

REV B