

Ürün

No. **270**

7,0-10,0 mm büyüklüğündeki Endotrakeal Tüplere uyar

Dale® Stabilock™ Endotrakeal Tüp Tutucu

Rahat ve Güvenli Stabilizasyon için

Ürün Tanımı

Yanlışlıkla ekstübasyon yapılmasını önler.

Uygulama Talimatı

1. Tüpü temizleyin. Kurumasını bekleyin.

2. Cildi temizleyin. Cilt hazırlık maddesi uygulayın. Yapışkan Tabandan çevreleyicileri çıkarın ve hastanın üst dudağının hemen üstüne koyun. **(A)** Gerektiği şekilde kısaltın. Yapışkan Taban yuvarlatılmış tırnaklar üstte veya altta olarak uygulanabilir.

Travma geçirmiş veya yüzü kıllı hastalar için
Yapışkan Tabanı kişiye göre ayarlayın: alt çeneye
Yuvarlatılmış tırnaklar yukarı bakar şekilde uygulayın; veya
yuvarlatılmış tırnakları kesip hastanın yanaklarına uygulayın.

Yapışkan Tabanı 3 günden sonra veya gerekirse daha erken değiştirin.

3. Boyun bandını tabanın Velcro® kısmına bastırın,
ve tüp Kanalı'nın endotrakeal tüp ile hizalandığından
emin olun. **(B)**

4. Boyun bandının her iki kısmında bulunan tutturucu tırnakları açın
ve bandı kulakların hemen altından baş etrafında sarın.
Tutturucu tırnakları boyun bandının
dışına tutturun. **(C)**

5. Kanalı endotrakeal tüpe doğru aşağı
bastırın. **(D)**

6. Endotrakeal tüpün pozisyon işaretinin hemen ilerisinde,
kuvvetli bir yapışkan bandı (örneğin bez) spiral bir hareketle
Kanal ve tüp etrafına sabitlenmeleri için kuvvetle sarın.

**Bandı endotrakeal tüpe Kanaldan sonra en az 2,5 cm
uzanacak şekilde sarın. (E)**

Bandı gerektikçe değiştirin.

Boyun bandının sağlamlığını tutturucu tırnakları gerektikçe
tekrar ayarlayarak sağlayın.

Tüpün Tekrar Konumlandırılması: Tutturucu tırnakları açın. Boyun bandını
tabandan soyarak ayırırken Yapışkan Tabanı yerinde tutun. Endotrakeal tüpü tekrar
konumlandırın. Tekrar tabana geri itip tutturucu tırnakları sağlamca tutturun.

Çıkarma: Tüpü Kanaldan bandını açıp çıkarın, boyun bandını çıkarın
ve Yapışkan Tabanı yavaşça soyarak çıkartın.

Dale dudaklara ve alttaki dokulara sürekli basınç nedeniyle
zarar gelmesini önlemeye yardımcı olmak için **endotrakeal tüpün
sık sık yeniden konumlandırılmasını önermektedir.**

Dale endotrakeal tüp üzerindeki basıncı azaltmak için ventilatör tüpünün desteklenmesini **kuvvetle önermektedir**.

Başarılı Uygulama için

Kolay Kontrol Listesi

- ✓ Her Yapışkan Taban uygulandığında cildi **hazırlayın**
- ✓ Yapışkan Tabanı dudak hattının hemen üzerinde **konumlandırın**
- ✓ Kanal ve tüp etrafında yapışkan bandı sıkıca **spiral şeklinde sarın**
- ✓ Bandı tüpe Kanaldan sonra en az 2,5 cm uzanacak şekilde **sarın**
- ✓ Yapışkan Tabanı cilt hasarını en aza indirmek için yavaşça **çıkartın**
- ✓ Ventilatör tüpünü **destekleyin**

Kullanım demonstrasyonu, uygulama videosu ve daha fazla bilgi için www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Sipariş Bilgisi

#H84102701 Dale® Stabilock™ Endotrakeal Tüp Tutucu
7,0-10,0 mm büyüklüğündeki Endotrakeal Tüplere uyar.
10'lu kutularda ayrı paketlenmiştir.

#H84102731 Dale® Stabilock™ Yapışkan Taban
10'lu kutularda ayrı paketlenmiştir.

Tek kullanımlıktır. Tek hastada kullanılmak üzere. Patent için başvurulmuştur.
ACLS kılavuz ilkelerine uygundur.

Dale medikal ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme satıcısından temin edilebilir.
Lateks İçermez.

©2006 Dale Medical Products, Inc. Velcro, Velcro USA, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır.
Tüm hakları saklıdır.

A.B.D.'de basılmıştır

REV B