

ARTIKELNUMMER:

316

KATHETERHOUDER (BEEN)

Eén universele maatvoering.

Productomschrijving

De Dale katheterhouder zorgt voor een veilige, comfortabele en uitstekende bevestiging van de catheter om het been. De gepatenteerde veilige groene klittenbandsluiting zorgt ervoor dat eventuele trekkracht geen invloed heeft op de positie van de katheter in de urinebuis of blaas.

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats de houder op het bovenbeen zodanig dat het Dale label zichtbaar is aan de buitenkant van het been zie afbeelding. Sluit de houder met behulp van de Klittenbandsluiting. Zorg ervoor dat de houder niet te strak rondom het been zit. De druk is goed wanneer je twee vingers onder de band kunt leggen.
2. Plaats de katheter over de witte stiksels van de groene klittenbandsluiting zie afbeelding. Laat daarbij een ruime lus in de katheter, dit tussen de houder en de uitgang van de katheter.
3. Als de katheter op de juiste plaats zit, plaats dan het smalle deel van de groene klittenbandsluiting over de catheter en breng deze door de vierkante opening van het brede deel van de klittenbandsluiting zie afbeelding. Zorg dat deze goed vastgeklit wordt.
4. Breng nu het brede deel van de groene klittenbandsluiting over de katheter heen. Zorg ook hierbij dat deze goed vastgeklit wordt zie afbeelding. Om de katheter te verplaatsen, trek dan de groene klittenbandsluiting los, verplaats de catheter en maak de klittenbandsluiting weer vast.
5. De katheter kan ook vastgezet worden door de klittenbandsluiting over het einde van de katheter te plaatsen (zie afbeelding 5).

Voordelen

Beschadigingen van de urethra en blaas worden tot een minimum beperkt. De houder geeft de gebruiker meer bewegingsvrijheid. Huidirritaties van pleisters behoren tot het verleden.

Waarschuwing

De katheterhouder is minder geschikt voor patiënten met flebitis, patiënten met slechte bloeddorstrooming of diabetes.

Sterilisatiemethode

Gas sterilisatie.

Bestelinformatie

316 Dale foley katheterhouder voor het been

Verpakt per 10 stuks
Eén universele maatvoering

330 Dale foley katheterhouder voor rondom het middel

Eén universele maatvoering

Dit product bevat geen Latex.

US Patent No. 5,941,856

Medical Device Safety Service

63 Hannover, Germany

Tel: 49-511-62 62 86 33 info@mdss.com