

RÉFÉRENCE DU PRODUIT:

316

ATTACHE POUR SONDE DE FOLEY

Jambière/taille unique

Avec un système de fermeture simplifié

Description du produit

Disponible en jambière ou en ceinture (taille). Equipé d'un système de fermeture velcro verts breveté qui attache en toute sécurité le cathéter de Foley sur le patient. A usage unique.

Instructions d'utilisation

1. Placez la bande en position haute autour de la cuisse du patient avec le sigle Dale orienté vers l'extérieur. Etirez la bande en place et attachez-la avec le velcro. Une compression suffisante est atteinte lorsque deux doigts peuvent passer sous la bande, mais en étant toutefois serrés .
2. Placez la sonde de Foley au-dessus des coutures blanches des languettes en velcro verts. Laisser une boucle ample dans la sonde au-dessus de la bande afin d'éviter toute traction sur la vessie. Etirez la sonde pour créer une tension si nécessaire.
3. Une fois la sonde placée en position voulue, positionner l'étroite languette en velcro verts sur la sonde et enfiler-la dans le trou de façon à ce que les velcros se chevauchent.
4. Bloquez la sonde en position voulue en tirant les languettes en velcro vert dans les directions opposées. Fixez les languettes. Pour replacer la sonde levez l'un des deux velcros verts, ajustez la sonde, et refermez les languettes en velcro verts.
5. Une autre méthode de fixation consiste à positionner la partie en Y de la sonde dans le système de fermeture.

Atout supplémentaires Pour éviter l'irritation du méat la bande peut être tournée dans n'importe quelle direction. Alternier les jambes peut aussi diminuer la gêne du patient.

Contre-indications Ne pas utiliser chez des patient atteints de Phlébite, de mauvaise circulation, ou de diabète avancé.

Entretien Lavez à la main ou à la machine. A é tende pour le séchage. Peut être stérilisé au gaz.

Référence commande:

316: Attache pour sonde de Foley, bande de jambe, Dale
Vendu par boites de 10
Une taille unique.

330: Attache pour sonde de Foley, No Translation supplied
Une taille unique.

Les supports de tubulures et autres fabrications DALE sont disponibles auprès de votre distributeur médical.

Produit Sans Latex.

US Brevet No. 5,941,856

The logo for DALE features the brand name in a stylized, bold, sans-serif font. The letters are composed of multiple parallel lines, giving it a three-dimensional, metallic appearance. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter 'E'.

PK-316 INTL

DALE M
PO BO
TEL 50