

PRODUKTNUMMER:

# 316

## BEIN-KATHETERHALTERUNG

Beinband Passend für alle Größen.  
Mit vereinfachtem Verschlusssystem

### Beschreibung

Als Bein-order Bauchband erhältlich.  
Herausragendes Merkmal ist das paten-  
tierte grüne Velcro-Klettverschlusssystem,  
das den Foley Katheter sicher am Patienten  
fixiert. Nur für den Gebrauch an einem  
Patienten.

### Gebrauchsanweisung:

1. Bringen Sie das Beinband an der oberen Hälfte vom Oberschenkel des Patienten mit dem Dale Etikett nach außen an. Dehnen Sie das Beinband nach Bedarf, und schließen Sie die Velcro-Klettverschlüsse. Die Kompression ist richtig, wenn zwei Finger bequem unter das Band passen.
2. Legen Sie den Foley Katheter über dem weißen Teil des grünen Velcro-Klettverschlusses an. Lassen Sie eine ausreichende Schlaufe im Katheter oberhalb des Beinbandes, um Blasentraction zu verhindern, oder dehnen Sie den Katheter, um so die notwendige Haftung zu erlangen.
3. Sobald der Katheter in der gewünschten Stellung ist, ziehen Sie den grünen Velcro-Klettverschluss über den Katheter und durch die quadratische Öffnung, so daß die Velcro-Klettverschlüsse überlappen.
4. Befestigen Sie den Katheter in der gewünschten Stellung, indem Sie die grünen Velcro-Klettverschlüsse in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Um den Katheter zu verstellen, heben Sie einen der beiden grünen Velcro-Klettverschlüsse an, plazieren Sie den Katheter, und befestigen Sie den Verschluss.
5. Sie können den Katheter ebenfalls durch eine andere Methode fixieren und sichern, indem Sie die Y-Verzweigung des proximalen Endes des Katheters am Verschluss befestigen.

### Zusätzliche Vorteile

Das Beinband kann in jede Richtung gedreht werden, um Hautreizungen zu verhindern. Das regelmäßige Wechseln des Beines kann ebenfalls zum größeren Komfort des Patienten beitragen.

### Kontraindikationen

Nicht zur Benutzung an Patienten mit Venenentzündungen, schlechter Zirkulation oder fortgeschrittener Diabetes.

### Pflegehinweise

Hand-oder Maschinenwäsche. Zum Trocknen aufhängen. Kann gassterilisiert werden.

### Bestellinformationen:

#### #316 Dale Bein-Katheterhalterung

Passend für alle Größen.  
In Zehnerpackungen erhältlich.

#### #330 Dale Bauch-Katheterhalterung

Passend für alle Größen.

Dale Tubushalterungen und andere Dale Erzeugnisse sind durch Ihren bevorzugten Krankenhausbedarf-Händler erhältlich.

### Enthält kein Latex.

US Patent Nr. 5 941 856

MEDICAL PRODUCTS, INC.,  
Box 1556, PLAINVILLE, MA 02762-0556 USA  
8 695 9316, FAX 508 695 6587