

CODICE

316

FISSATORE PER SONDE FOLEY

Misura unica

Con sistema di chiusura semplificato

Descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni per l'arto inferiore o per l'addome. Presenta un sistema brevettato di chiusura con Velcro® verde che assicura un buon posizionamento del catetere di Foley.

Istruzioni per l'uso

1. Posizionare la fascia per gamba attorno alla coscia del paziente con l'etichetta Dale che guarda verso l'esterno della gamba. Tirare la fascia e chiudere con il Velcro. Una buona compressione è ottenuta quando tra la fascia e la gamba possono passare due dita.
2. Sistemare il catetere di Foley sopra la cucitura bianca della linguetta verde in Velcro. Lasciare un'occhiello ampio sopra la fascia per evitare trazione alla vescica;
o tirare il catetere per trazione se necessario.
3. Quando il catetere è nella posizione desiderata, inserire la parte più stretta del Velcro verde sopra il catetere e dentro all'apertura quadrata in modo da chiudere le due estremità del Velcro.
4. Fissare il catetere in posizione tirando le due estremità in Velcro verde in direzione opposta. Fissare le estremità. Per riposizionare il catetere, sollevare le linguette verdi, sistemare il catetere e rifissare.
5. Un altro metodo per fissarlo è quello di posizionare il raccordo a Y della parte prossimale del catetere nel dispositivo di chiusura della fascia.

Ulteriori benefici Aiuta a prevenire l'irritazione del meato; la fascia può ruotare in entrambi i sensi. Un ulteriore comfort al paziente è dato dall'alternare l'applicazione sulle due gambe.

Controindicazioni Non usare su pazienti con flebiti, problemi di circolazione e diabetici in stadio avanzato.

Lavaggio e cura Lavare a mano o in lavatrice. Stendere per asciugare. Può essere sterilizzato a gas.

Informazioni commerciali

Cod. 316 Fissatore persone Foley-modello per gamba.

Misura unica. In scatole da 10 pezzi.

Cod. 330 Fissatore persone Foley-fascia addominale.

Misura unica.

Le fascie DALE sono disponibili dal Vostro fornitore preferito.

Prodotto Senza Lattice

Brevetto USA No. 5,941,856

Medical Device Safety Service

63 Hannover, Germany

Tel: 49-511-62 62 86 33 info@mdss.com