

ARTIKELNUMMER:

H84106001

NEUSVERBANDHOUDER

Productomschrijving

De Dale neusverbandhouder zorgt voor een uitstekende, snelle en eenvoudige fixatie van het neusverband. Vervangt hechtpleister, is comfortabel voor de patient en bespaart de verpleging tijd.

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats het plastic deel onder de neus, over het verband en haak de lussen rond de oren.
2. Voor de juiste maat, van oor tot neus, kunnen de oorlussen d.m.v. de klittebandsluiting versteld worden.
3. Vouw het einde van de houder over het klitteband en druk stevig aan. Zorg ervoor dat het plastic deel recht onder de neus zit. Het overtollige materiaal kan worden afgeknipt.

Vervanging van Neusverband

Maak om het neusverband te vervangen de houder aan één zijde los, vervang het verband en haak de lus om het oor.

De Dale neusverbandhouder slechts bij 1 patient gebruiken.

Bestelinformatie

#H84106001 Dale
Neusverbandhouder
Verpakt per 10 stuks.

Eén universele maat.

Dit product bevat geen Latex

ative:

oe B.V. Nieuwegein, NL.

458 FAX: 31.30.280.0388