

RÉFÉRENCE DU PRODUIT

H84106001

SUPPORT DE PANSEMENT NASAL

Description du Produit

Le support de pansement nasal de Dale remplace les bandes adhésives utilisées à ce jour pour maintenir les compresses nasales. Il élimine les irritations de la peau, simplifie les changements de pansements, améliore le confort du patient et fait gagner du temps au personnel soignant. Usage à patient unique. Taille unique.

Instructions d'Utilisation

1. Centrez la section en plastique sous le nez et sur le pansement nasal, placez les boucles des lanières autour des oreilles du patient.
2. Pour ajuster la taille (du nez à l'oreille) levez un bout de la lanière et ajuster la boucle d'oreille. Attachez la languette afin d'obtenir la longueur voulue.
3. Repliez le bout de la lanière par dessus la boucle d'oreille. Répétez pour l'autre côté. Les longueurs inutiles de matériau peuvent être coupées.

Pour Changer le Pansement

Pour changer le pansement enlevez une des boucles sur une des oreilles, changez le pansement et replacez la boucle d'oreille.

Pour Commander:

#H84106001 Support de
pansement nasal,
Dale
taille unique
Vendu par boîtes de 10

Les produits DALE sont disponibles auprès de votre distributeur médical.

Produit sans Latex



DALE MEDICAL PRODUCTS
7 Cross Street, P.O. Box 100
TEL: 800-343-3980
www.dalemed.com