

PRODUCTO NUMERO

H84106001

SOSTENEDOR DE VENDAJES NASALES

Descripción del Producto

El sostenedor de vendaje nasal de Dale, reemplaza al esparadrapo o cinta actualmente usada para sostener los vendajes nasales.

Elimina la irritación de la piel.

Simplifica el cambio de los vendajes, mejora la comodidad del paciente y también ahorra tiempo.

Para uso de un paciente únicamente. Una sola talla para todos.

Instrucciones Para su Aplicación

1. Coloque la sección de plástico debajo de la nariz y sobre el vendaje nasal, coloquense los círculos alrededor de las orejas.
2. Para ajustar la medida de la nariz a la oreja, levanta la punta de la banda y mueve el cierre del círculo de oreja hasta obtener la medida deseada.
3. Dobla la punta de la banda sobre el cierre del círculo de oreja. Repite lo mismo en el otro lado. El material que sobra puede ser cortado.

Para Cambiar Vendajes

Para cambiar los vendajes nasales, remueve el círculo de la oreja, cambia el vendaje y vuelve a colocar el círculo en la oreja.

Información Sobre Pedidos

#H84106001 Sostenedor de
Vendajes Nasales
de Dale
Una sola talla
para todos
Se venden en cajas
de 10.

Los productos médicos de DALE están a la venta en tu hospital favorito o por el distribuidor de productos médicos o de hospital.

Producto sin Látex

PRODUCTS, INC.

Box 1556 Plainville, MA 02762-0556 USA

INT'L: 508-695-9316 FAX: 508-695-6587