

Productnummer

**H84106201**

Niet steriel

# Dale® transducerhouder

---

Der **Dale® transducerhouder** is samengesteld uit een stevig platform waarop maximaal drie transducers kunnen worden aangebracht voor patiënten met hemodynamische bewaking. De stabiliteit van de Dale transducerhouder draagt bij tot een goede werking van het numerieke display, wanneer deze correct op de flebostase-as geplaatst wordt. De Dale transducerhouder vermindert de kans op onnauwkeurige meetwaarden als gevolg van verkeerde plaatsing of plaatsing onder een verkeerde hoek van de transducers.

Het platform vormt zich naar de arm van de patiënt, en vormt de basis waarop de drie waterpastabs worden aangebracht. Het platform is vervaardigd uit een zacht, comfortabel materiaal en wordt op de arm vastgezet met een elastische band voorzien met een verstelbare klittenbandsluiting.

De drie bevestigingstabs besparen heel wat tijd en moeite in vergelijking met het handmatig waterpas zetten en vastplakken van afzonderlijke transducers (op de borst of arm van de patiënt of op een statief). Hierbij worden eveneens mogelijke problemen die zich kunnen voordoen met een kleefband fixatie van de transducers, en/of het verplaatsen van het statief door het bewegen van de patiënt vermeden.

## **Anleitung zum Anlegen:**

- 1.** Plaats de houder langs de flebostase-as (midden van de borst) en wikkel hem om de arm van de patiënt. Druk het klittenband aan om het vast te zetten.
- 2.** Open het klittenband, haal het door de sleuf/sleuven van de transducer(s) en druk het aan om het vast te zetten.

## **Voor gebruik bij één patiënt.**

## **Bestellinformatie**

---

Nr. H8410**6201** Dale® transducerhouder

Is geschikt voor de meeste patiënten. Afzonderlijk verpakt. Verkocht in dozen à 10 stuks.

---

Dale medische producten zijn verkrijgbaar bij uw leverancier voor medische producten. **Latexvrij.** Octrooi aangevraagd  
Velcro is een gedeponeerd handelsmerk van Velcro USA, Inc.