

Numéro de référence

H84106201

Non stérile

Support de transducteurs Dale®

Le **support de transducteurs Dale®** assure une plateforme de niveau sécurisée pouvant accueillir trois transducteurs destinés à la surveillance hémodynamique de vos patients. Sa stabilité permet un bon fonctionnement de l'affichage numérique correspondant lorsqu'on place correctement le support en l'alignant sur l'axe phlébostatique. Il réduit la probabilité de mesures inexactes résultant de la mise en place ou de l'alignement incorrect des transducteurs.

La plateforme s'adapte au bras de chaque patient. Elle assure une base sur laquelle les trois bandelettes de maintien à niveau sont fixées. Elle est fabriquée d'un matériel souple et confortable et s'attache solidement au bras par une bande élastique à fermeture réglable Velcro®.

Les trois bandelettes de maintien réduisent le temps d'alignement et les inconvénients afférents à la mise à niveau et au placement manuel des transducteurs à l'aide de bandes adhésives sur le thorax, sur le bras du patient ou sur une potence adjacente au lit. Éliminant les aléas dus aux mouvements du patient ou de la potence, le support de transducteurs Dale® supprime en même temps les difficultés de la fixation par bandes adhésives sur le corps ou un support extérieur

Instructions pour l'application:

- 1.** Aligner le support sur l'axe phlébostatique (milieu du thorax) et l'enrouler autour du bras du patient. Appuyer sur la fermeture Velcro® pour attacher.
- 2.** Dérouler les bandelettes Velcro® nécessaires, les faire passer dans la ou les fentes du ou des transducteurs et appuyer pour assurer la fixation.

Réservé à l'usage d'un seul patient.

Information pour passer des commandes

N° H8410**6201** **Support de transducteurs Dale®**

S'adapte à la taille de la plupart des adultes. Conditionné individuellement. Vendu en boîtes de 10 unités.

Les produits médicaux Dale® sont disponibles auprès de votre distributeur d'accessoires médicaux/à l'usage des hôpitaux. **Sans latex.**

Brevet en instance d'homologation

Velcro® est une marque déposée de Velcro USA, Inc.