

Codice

H84106201

Non sterile

Porta-trasduttori

Dale®

Il **porta-trasduttori Dale®** è stato studiato per i pazienti sottoposti a monitoraggio emodinamici. Consente di applicare un massimo di tre trasduttori in sicurezza e nella corretta posizione orizzontale. Quando il porta-trasduttori Dale® è posizionato correttamente rispetto all'asse flebostatico consente il regolare funzionamento del display numerico. Il porta-trasduttori Dale® riduce la probabilità di rilevazioni inesatte dovute alla posizione non corretta o non orizzontale dei trasduttori.

Il supporto si adatta al braccio del singolo Paziente ed è la base sulla quale vengono fissate le tre linguette di sostegno orizzontali. Realizzato in materiale morbido e confortevole, il supporto viene allacciato al braccio con una fascetta elasticizzata dotata di chiusura regolabile in Velcro®.

Le tre linguette di sostegno riducono il tempo e il lavoro necessari per posizionare e collegare i singoli trasduttori al petto o al braccio del paziente, o di montarli sull'asta vicino al letto. Con il portatrasduttori Dale® non è più necessario fissare i trasduttori con del cerotto o di riposizionare l'asta spostata a causa di qualche movimento del paziente.

Istruzioni per l'applicazione:

1. Posizionare il porta-trasduttori lungo l'asse flebostatico (linea mediana del torace) e avvolgerlo intorno al braccio del paziente. Fissare premendo il Velcro®.
2. Aprire le necessarie linguette di Velcro®, farle passare attraverso la/le fessure del/i trasduttore/i e fissare premendo.

Il prodotto è esclusivamente monopaziente.

Informazioni commerciali

Cod. H8410**6201** **Porta-trasduttori Dale®**

Misura adatta alla maggior parte degli adulti.

Confezionato singolarmente.

Venduto in confezioni da 10 pezzi.

I prodotti per uso medico Dale sono disponibili presso il vostro abituale distributore di forniture ospedaliere/medicali.

Non contiene lattice.

Brevetto in corso

Velcro® è un marchio registrato di Velcro USA, Inc.