

ARTIKELNUMMER:

650/651/652

BUIGZAME ARM/ HAND- HOUDER

Productomschrijving:

De Dale arm/ handhouder zorgt voor een goede stabilisatie van de pols. Beweging van de pols en onderarm wordt hierdoor voorkomen. De arm/ handhouder wordt gebruikt voor het probleemloos aanprikken, plaatsen en veilig bevestigen van "arteriële-lijnen", "monitor-lijnen" (o.a. voor bloeddruk meting) en "perifere lijnen" bij de patiënt.

De houder is eenvoudig in vorm te buigen en is gemaakt van een zacht comfortabel materiaal. De elastische banden voor de bevestiging van de houder zijn voorzien van een klittenband-sluiting, zodat de houder snel en eenvoudig kan worden aangebracht.

Het gebruik:

1. Bepaal de juiste houding van de pols van de patiënt en breng hierna de houder in de juiste vorm. (figuur A & B).

2. Breng de elastische banden rond de hand (inclusief duim) en de arm van de patiënt en zorg daarbij voor een juiste fixatie van de houder. Sluit hierna de klittenbandsluiting (figuur C).

Bestelinformatie:

#H84106501

Dale arm/ handhouder (groot)

Verpakt per 10 Stuks.

#H84106511

Dale arm/ handhouder (middel)

Verpakt per 10 Stuks.

#H84106521

Dale arm/ handhouder (klein)

Verpakt per 10 Stuks.

Product bevat geen latex

Voor éénmalig gebruik

US Patent 5,845,643