

RÉFÉRENCE DU PRODUIT:

650/651/652

SUPPORT DE BRAS FLEXIBLE

Système tout-en-un

Description du produit:

Le support de bras flexible Dale permet de positionner et d'immobiliser le poignet afin d'éviter les mouvements non désirés durant l'insertion et du monitoring des lignes artérielles au bloc opératoire, la salle de réveil et les diverses unités de soins.

Ce support de bras peut s'adapter à toutes les positions souhaitées. Il est recouvert d'un matériau doux, confortable et se ferme au moyen de lanières à fermeture Velcro®. Le support de bras peut être utilisé pour immobiliser le pouce pendant l'extension du poignet pour un accès optimal à l'artère radiale. Ce système facilite l'insertion de la ligne artérielle, ainsi que le monitoring invasif de la tension et des gaz artériels pendant des périodes prolongées. Ce produit peut également être utilisé comme en tant qu'appui bras conventionnel dans le cadre de perfusions intraveineuses périphériques.

Mode d'emploi:

1. Étendez le poignet du patient au maximum et positionnez le support de bras dans l'alignement. Pliez celui-ci jusqu'à la forme souhaitée. (Figure A & B)
2. Placez les lanières à fermeture Velcro® autour de la main et de l'avant bras selon la tension désirée. Fermez ces lanières en exerçant une pression sur la partie Velcro® pour qu'ils tiennent. (Figure C)

Information commande:

H84106501

Support de bras flexible Dale®

Grande taille

Vendu par boîtes de 10

H84106511

Support de bras flexible Dale®

Taille moyenne

Vendu par boîtes de 10

H84106521

Support de bras flexible Dale®

Petite taille

Vendu par boîtes de 10

Sans Latex.

Usage unique.

Brevet américain n° 5,845,643

Velcro® est une marque déposée de

Velcro USA, Inc.

The logo for Dale Medical, featuring the word "DALE" in a stylized, bold, sans-serif font. The letters are composed of multiple parallel lines, giving it a 3D or layered appearance. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter 'E'.

DALE M

PO BOX

TEL 1 50

www.dal