

PRODUKTNUMMER:

650/651/652

Biegsame Armschiene

mit Befestigungsbändern

Produktbeschreibung:

Die biegsame Armschiene von Dale positioniert und stabilisiert das Handgelenk, um ungewollte Bewegungen während der Anbringung und Überwachung von arteriellen Linien im OP, Aufwachraum und auf den Stationen zu vermeiden.

Die Armschiene kann individuell angepaßt werden. Sie ist mit einem angenehm weichen Material überzogen und wird mit elastischen, latex-freien Bändern und Klettverschlüssen befestigt. Um einen optimalen Zugang zur Radialis zu gewährleisten, kann der Daumen bei gleichzeitiger Überstreckung des Handgelenks fixiert werden. Arterielle Kanülen können unproblematisch eingeführt und sicher an Ort und Stelle gehalten werden. Darüber hinaus wird die Überwachung des invasiven arteriellen Blutdrucks und der arteriellen Blutgase über einen längeren Zeitraum ermöglicht.

Die Armschiene kann auch für intravenöse Infusionen eingesetzt werden.

Gebrauchsanleitung:

1. Überstrecken Sie das Handgelenk des Patienten, und positionieren Sie die Armschiene. Biegen Sie die Armschiene in die gewünschte Position. (Abb. A & B).
2. Befestigen Sie die elastischen Bänder mit leichtem Zug um Hand bzw. Arm, und fixieren Sie diese mit den Klettverschlüssen. (Abb. C).

Bestellinformation:

#H84106501

Dale® Biegsame Armschiene, Größe L
Verpackungseinheit: 10 Stück

#H84106511

Dale® Biegsame Armschiene, Größe M
Verpackungseinheit: 10 Stück

#H84106521

Dale® Biegsame Armschiene, Größe S
Verpackungseinheit: 10 Stück

Produkt enthält kein Latex.

Nur zur Verwendung an einem Patienten
US Patentnummer 5,845,643

Velcro® ist eine Marke der Velcro USA, Inc.