

CODICE

650/651/652

SUPPORTO PIEGHEVOLE PER BRACCIO

Sistema di fissaggio tutto-in-uno

Descrizione del prodotto:

Il supporto pieghevole per braccio Dale® posiziona e stabilizza il polso per evitare movimenti indesiderati durante l'inserimento e il monitoraggio delle linee arteriose in sala operatoria, sala risveglio e nei reparti di medicina. Il supporto per braccio può essere modellato sul paziente alla posizione desiderata. È ricoperto di un materiale soffice e confortevole e si fissa al polso con del Velcro® regolabile che può essere anche usato per bloccare il pollice durante l'estensione del polso per un miglior accesso all'arteria radiale. Il supporto permette di eseguire un cateterismo arterioso in sicurezza, facilitando il monitoraggio invasivo della pressione arteriosa e gas analisi arteriosa per lunghi periodi. Il prodotto può anche essere usato come un supporto tradizionale per le vie infusionali periferiche.

Istruzioni per l'Uso:

1. Estendere completamente il polso del paziente e allinearli al Supporto. Piegare il supporto alla posizione desiderata (Figura A & B).
2. Fissare le fasce in VELCRO® attorno al polso e bloccarle alla tensione desiderata. Premere sul VELCRO® per bloccare le fasce (Figura C).

Gamma disponibile:

H84106501

Supporto Pieghevole per Braccio

Mis. Large

Venduto in confezioni da 10 pezzi.

H84106511

Supporto Pieghevole per Braccio

Mis. Medium

Venduto in confezioni da 10 pezzi.

H84106521

Supporto Pieghevole per Braccio

Mis. Small

Venduto in confezioni da 10 pezzi.

Latex Free

Monopaziente

Numero di Brevetto US 5,845,643

VELCRO® è un marchio registrato di Velcro USA, Inc.