

PRODUCTO NUMERO:

# 650/651/652

## SUORTE DE BRAÇO MOLDÁVEL

Sistema "Tudo em Um"

### Descrição do Produto:

O Suporte de Braço Moldável Dale posiciona e fixa o punho para impedir movimentos indesejados durante a introdução e monitorização de linhas arteriais no bloco operatório, sala de recobro e unidades de cuidados de doentes.

A forma do Suporte de Braço pode ser personalizada para qualquer posição desejada. É revestido por um material macio e confortável, e apertado com VELCRO® ajustável. Pode ser utilizado para fixar o polegar durante a extensão do punho, para um melhor acesso à artéria radial. Tal permite a introdução de linhas arteriais com menos problemas e facilita a monitorização invasiva da pressão arterial e dos gases sanguíneos durante longos períodos de tempo.

O produto também pode ser utilizado como um Suporte de Braço tradicional para as linhas IV periféricas.

### Instruções de Aplicação:

1. Efectuar a extensão máxima do punho do doente e alinhá-lo com o Suporte de Braço. Moldar até à posição pretendida (Figura A & B).
2. Envolver a mão e o suporte com as tiras de VELCRO® até que se obtenha a tensão pretendida. Pressionar os fechos do VELCRO® para fixar (Figura C).

### Informações para Encomendas:

---

**H84106501**

**Suporte de Braço Moldável Dale®**  
amanho Grande  
endido em embalagens de 10.

**H84106511**

**Suporte de Braço Moldável Dale®**  
amanho Médio  
endido em embalagens de 10.

**H84106521**

**Suporte de Braço Moldável Dale®**  
amanho Pequeno  
endido em embalagens de 10.

Não contém látex

Uso Único.

Número da Patente nos EUA 5,845,643

VELCRO® é uma marca comercial registrada de Velcro USA, Inc.

The logo for DALE, featuring the letters 'DALE' in a stylized, bold, sans-serif font. The letters are composed of multiple parallel lines, giving it a 3D or shadowed appearance. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter 'E'.

DALE M

PO BOX

TEL 1 5

www.da