

**French:**

1. Passer délicatement le bras du patient par l'ouverture du soutien-gorge.
2. Tourner le patient sur le côté et positionner la partie arrière du soutien-gorge dans le dos du patient.
3. Passer l'autre bras dans l'ouverture.
4. Fixer les deux extrémités du soutien-gorge à l'aide des fermetures Velcro (exercer une certaine tension).
5. Vous pouvez aisément repositionner le soutien – gorge en ajustant les fermetures Velcro.
6. Le soutien-gorge post-opératoire maintient les pansements de façon optimale jusqu'au contrôle suivant.