

German

1. Stecken Sie den Arm der Patientin vorsichtig durch den BH-Träger.
2. Drehen Sie die Patientin auf die Seite, und ziehen Sie den BH den Rücken entlang zum anderen Arm.
3. Drehen Sie die Patientin zurück in Ausgangsposition, und stecken Sie den anderen Arm durch die zweite Trägeröffnung.
4. Kletten Sie den BH vorne mittels des Velcro-Verschlusses zusammen (es sollte leichter Druck entstehen)
5. Durch Öffnen und erneutes Schließen des Frontverschlusses läßt sich der BH einfach anpassen.
6. Der Kompressions-BH gewährleistet eine sichere Fixierung des Wundverbands.