

Italian:

1. Inserire delicatamente il braccio del paziente attraverso l'apertura.
2. Ruotare il paziente sul fianco e portare il reggiseno chirurgico dietro la schiena del paziente.
3. Posizionare il braccio opposto attraverso l'apertura.
4. Afferrare gli estremi del reggiseno e premere il Velcro per fissarlo (dovrebbe esserci un po' di tensione).
5. Il reggiseno può essere facilmente adattato staccando le superfici in Velcro e riposizionandole.
6. Il reggiseno post-chirurgico mantiene il bendaggio del paziente in posizione fino alla visita successiva.