

Portuguese:

1. Com suavidade coloque o braço do paciente pela abertura do sutiã.
2. Rode o paciente sobre o lado e ajuste atrás o sutiã pos-cirúrgico.
3. Coloque o braço pela outra abertura do sutiã.
4. Pegue ambos os fins do sutiã e aperte o Velcro para o seu ajuste (deve haver tensão).
5. O sutiã possui Velcro que pode ser ajustado facilmente da maneira em que preferir.
6. Do sutiã pos-cirúrgico prende o curativo no lugar certo até o retorno ao medico.